

ZYGOMA MINIMALLY INVASIVE TECHNIQUE

by Dott. Andrea Tedesco




ES052XGT

ø: 0,6 ø: 2,2 mm
Lo: 13 mm
La: 14 mm
TP: 4-6-8-10-12 mm
PM: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

Punta a forma conica, con microaffilatura a 8 denti, utilizzata per la preparazione iniziale del sito implantare. MICRO-AFFILATA.

Conical shaped tip, micro-sharped with 8 teeth, used for the initial preparation of the implant site. MICRO-SHARPENED.

U (1)	35
V (2)	80
P (3)	100
MAX POWER (4)	60

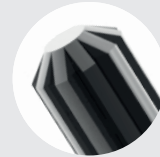

ES020XLT


ø: 2,2 mm
Lo: 4 mm
La: 18 mm
TP: 6-8-10-12 mm
PM: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

By Dott. Andrea Tedesco

Punta a forma cilindrica utilizzata per la preparazione degli ultimi due millimetri del sito implantare, vicino al seno mascellare o al nervo. MICRO-AFFILATA

Cylindrical shaped tip, used for the preparation of the last two millimeters of the implant site near to the sinus or to the nerve. MICRO-SHARPENED.

U (1)	40
V (2)	80
P (3)	100
MAX POWER (4)	50

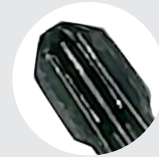

ES02.9XLT

ø: 2,9 mm
Lo: 4 mm
La: 18 mm


Punta a forma conica, con microaffilatura. MICRO-AFFILATA.
Conic shaped tip, micro-sharped. MICRO-SHARPENED.

U (1)	40
V (2)	80
P (3)	100
MAX POWER (4)	50



ZYGOMA MINIMALLY INVASIVE TECHNIQUE

by Dott. Andrea Tedesco

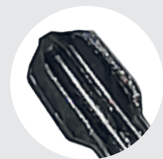

ES03.5XLT


ø: 3,5 mm
Lo: 4 mm
La: 18 mm



Punta a forma tronco-conica, microaffilata a 8 denti. Per foro finale. MICRO-AFFILATA.

Truncated conical tshaped tip, 8 teeth microsharpened. For final hole. MICRO-SHARPENED

U (1)	40
V (2)	80
P (3)	100
MAX POWER (4)	50

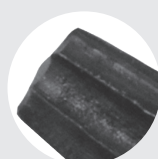

ES0SV1T

ø: 2,4 ø: 3,8 mm
Lo: 8 mm
La: 19 mm
TP: 10-12-14 mm
PM: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm



Forma conica per la preparazione del sito implantare, utilizzabile anche per short implant. MICRO-AFFILATA.

Conical shaped tip for implant site preparation, also for short implant. MICRO-SHARPENED.

U (1)	40
V (2)	90
P (3)	100
MAX POWER (4)	60



ES052XZIT*


ø: 2,9 mm
Lo: 40 mm
La: 45 mm
PM: 10-12-20-25-30-35-40 mm



Punta a forma tronco-conica, microaffilata. MICRO-AFFILATA.

Truncated conical tshaped tip, microsharpened. MICRO-SHARPENED

U (1)	50
V (2)	80
P (3)	100
MAX POWER (4)	60

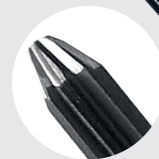

ES03.5ZIT*

ø: 3,5 mm
Lo: 40 mm
La: 45 mm



Punta a forma tronco-conica, microaffilata a 8 denti. MICRO-AFFILATA.

Truncated conical tshaped tip, 8 teeth microsharpened. MICRO-SHARPENED

U (1)	50
V (2)	80
P (3)	100
MAX POWER (4)	60

(1) U: POTENZA CONSIGLIATA *SUGGESTED POWER* (2) V: VIBRAZIONE CONSIGLIATA *SUGGESTED VIBRA* (3) P: PORTATA POMPA NB: consigliamo a 100 per raffreddamento osso *WATER PUMP NB: suggested at 100 for bone cooling*
(4) MAX POWER: potenza massima a cui è possibile utilizzare l'inserto *MAX POWER: maximum power which can be used with the insert.* ***MASSIMO UTILIZZO 1 VOLTA** ***MAX USE 1 TIME.**